

PraxisPause

Checkliste für die optimale Vorbereitung Ihrer Praxis auf eine Betriebspause

Allgemein

- Wartungen und/oder Reparaturen beauftragen
- Verbrauchsmaterialbestand prüfen und ggf. nachbestellen

Behandlungseinheiten

- Intensiventkeimungsprogramm starten
- Filtersiebe reinigen/erneuern
- Saugschläuche mit Saugsystemreiniger durchsaugen
- Polster reinigen und mit Pflegemittel einreiben
- Fremdgeräteanschlüsse abklemmen
- Gerät ausschalten

Amalgamabscheider

- Filtersiebe reinigen/erneuern

RDG (Thermodesinfektor/Melatherm)

- Gerät leerlaufen lassen
- Filtersiebe reinigen/erneuern
- Speicherkarte auslesen
- Wasser abstellen

Autoklav/Sterilisator

- Wasser abstellen
- Speicherkarte auslesen

DAC Universal

- Wasser und Druckluft abstellen

Zahnsteinentfernungsgeräte

- Ausspülen und Wasserzulauf trennen
- ZEG-Spitzen und Handstücke demontieren und aufbereiten

Pulverstrahlgeräte

- Ausspülen und Wasserzulauf trennen
- Pulver entfernen, Handstücke reinigen

Instrumenten-Pflegegeräte

- Druckluft abstellen
- Gerät reinigen und wischdesinfizieren

Kompressor, Power-Tower

- Ausschalten
-

Saugmaschine

- Filtersiebe reinigen (falls vorhanden)
- Ausschalten

Entkalkungsanlagen

- Herstellerangaben beachten

Praxislabor

- Wasser und Druckluft abstellen
- Gasflaschen zudrehen

Hygiene

- Angebrochene Materialien verbrauchen/entsorgen
- Flächen reinigen und desinfizieren

Elektrik/Strom (je nach Praxisausstattung)

- Magnetventil für Hauptwasserunterbrechung prüfen
- Antennenstecker ziehen
- Hauptschalter ausschalten

Wasser

- Absperrwirkung an den Behandlungseinheiten überprüfen
- Bottle-Systeme: Desinfektionsflüssigkeiten einspülen
- Hauptwasserhahn zudrehen (nicht bei automatischen Spüleinrichtungen)
- Um eine Verkeimung zu verhindern, sollten die Wasserleitungen während der Praxispause mind. 1 x wöchentlich gespült werden. Hierzu alle Zapfstellen in der Praxis für ca. 1 Minute öffnen, ggf. Hygieneprogramme an den Behandlungseinheiten durchführen.

EDV

- Updates organisieren
- Backup erstellen
- PC-Stecker ziehen, WLAN abschalten
- Umgang mit Server klären (ggf. nicht abstellen)

Nach der PraxisPause

- Wasserleitungen spülen, entkeimen und wieder spülen
 - Durch Absaugschläuche mind. 0,5 Liter Wasser ansaugen
 - Alle Oberflächen abwischen
-

Diese Liste soll Ihnen als Leitfaden dienen. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Herstellerangaben. Selbstverständlich kann hier nicht auf alle Geräte eingegangen und kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.